

## Mounting/user description for hinged calf support Montering/brukerbeskrivelse for hengslet leggstøtte

### Norsk

Demonter leggstøttebrakett/leggpute på benstøttene ved å skru av mutter som vist på bilde A og trykk på skrue slik at den kommer ut på motsatt side (bilde B) og dra den ut for så å skyve delene fra hverandre.

Sett klemmehalvdel på overarm og klem rundt til den klikker i "lås".


Før leggstøttebraketten langs overarmen på benstøtten slik at den glir inn i sporet på klemmehalvdel.

Monter skrue (bilde C) og mutter (bilde D) og juster høyde i forhold til bruker og skru fast.


For å svinge leggplaten bakover, så må låsehendel (bilde F) trekkes opp og holdes der for så å svinge leggplaten bakover.

Benstøtten kan da fjernes uten noen store bevegelser på brukers ben ved at benstøtten løftes, svinges litt ut for så å ta av benstøtten.


A

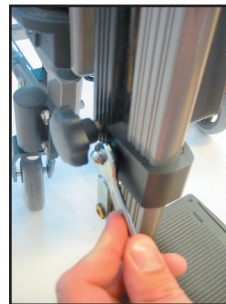


B

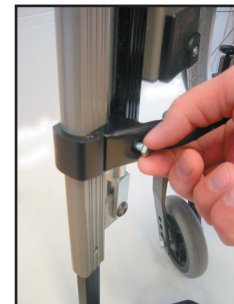

C

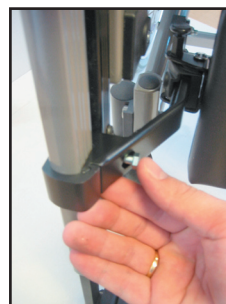

D

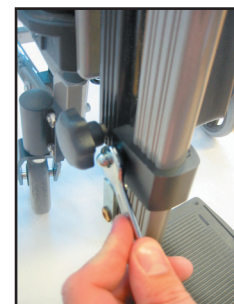

### English

Dismount the calf support bracket/calf pad on the foot support by unscrewing the nut as shown in picture A and push the screw so you can remove it from the other side (picture B) and slide the parts apart.

Put the clamp half around the upper arm and press it until it snaps into "lock".

Guide the calf support bracket along the upper arm until it slides into the rail on the clamp half.


Attach the screw (pic.C) and nut (pic.D) and adjust the height in proportion to the user.

To move the calf pad rearwards, the lock handle (pic F) must be lifted and held in position until the calf pad is moved rearwards.

The foot support can now be removed without moving the foot of the user too much.

Lift the foot support and turn it outwards and remove the foot support.

E

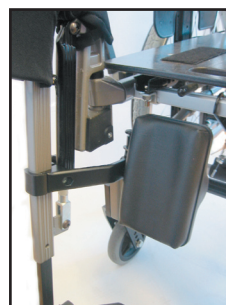

F



G

