

- Ⓝ Monteringsanvisning
Bekkensele skai - Art. nr. 21012
- Ⓞ Mounting description
Abduction belt leather - Item no. 21012



- Ⓝ Trekk beltet gjennom hoftebeltefestet som ligger vedlagt. Tre beltet tilbake gjennom belteklemmene.
- Ⓞ Pull the belt through the hole in the hip belt bracket. Thread the belt back through the enclosed belt clamps.



- Ⓝ Fest hoftebeltet i det bakerste hullet i rygghengsle-braketten med den vedlagte skrue og mutter. Bruk to 13mm fastnøkler.
- Ⓞ Fix the hip belt bracket in the backmost hole of the backrest hinge using the enclosed screws and nuts. Use two 13mm open-end spanners.



- Ⓝ Selene føres fra undersiden og på innsiden av lår, og dras deretter ut til hver side av hofter.
- Ⓞ The straps are pulled up along the inside of the thighs, and then out to each side of the hip.



- Ⓝ Låsen føres på utsiden av ryggør og festes bak rygg.
- Ⓞ The lock straps are placed around the backrest tubes and locked behind the backrest.

