



ALU_REHAB™

- (N) Monteringsanvisning
Bekkesele Neopren - Art. nr. 21011
- (GB) Mounting description
Abduction belt Neoprene - Item no. 21011

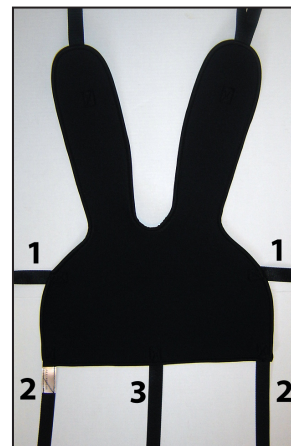

1. (N) Trekk remmen gjennom hoftebeltefestet.
Tre remmen tilbake gjennom belteklemmen.
- (GB) Pull the strap through the hole in the hip belt bracket.
Thread the strap back through the belt clamp.
2. (N) Tre på en belteklemme, og trekk remmen deretter gjennom plastklemmen. Tre remmen tilbake gjennom belteklemmen.
- (GB) Pull on a belt clamp, then pull the strap through the hole in the enclosed plastic clip. Thread the strap back through the belt clamp.
3. (N) Fest den ene enden på justerremmen i plastlåsen.
- (GB) Fix one end of the adjustment strap in the plastic clip.
4. (N) 1. Fest stropp 2 og hoftebeltebraketten i det bakerste hullet i rygghengsle-braketten med den vedlagte skrue og mutter. Bruk to 13mm fastnøkler.
2. Fest stropp 1 på hver side til topprammen med en belteklemme.
- (GB) 1. Fix the hip belt bracket and strap 2 in the rearmost hole of the back rest hinge using the enclosed screws and nuts. Use two 13mm open-end spanners.
2. Attach strap 1 on each side to the top frame using a belt clamp.
5. (N) Fest stropp 3 med en belteklemme til tverrstaget under seteplaten.
- (GB) Strap 3 is attached to the cross bar under the seat plate using a belt clamp.
6. (N) Før sammen plastlåsene, og dra i ringen for å stramme.
- (GB) Put the plastic locks together and pull the rings to tighten.

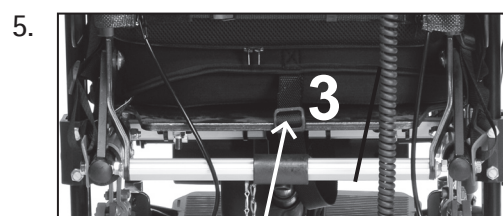

NB! Fest stropp 3 **under** seteplaten mot fronten, og ikke bak på ryggstag.
NB! Attach strap 3 to the cross bar **under** the seat plate towards the front, and not on the backrest bar at the rear of the seat plate.